

Ficha Técnica – Pharmapad Carbon

Registro ANVISA: MS 81606090039


Marca / Modelo fabricante: Pharmapad Carbon

Fabricante: Pharmaplast

Representação Gráfica

Filme de polietileno
não aderente

Camada de carvão ativado
prensado entre duas
camadas de lã absorvente

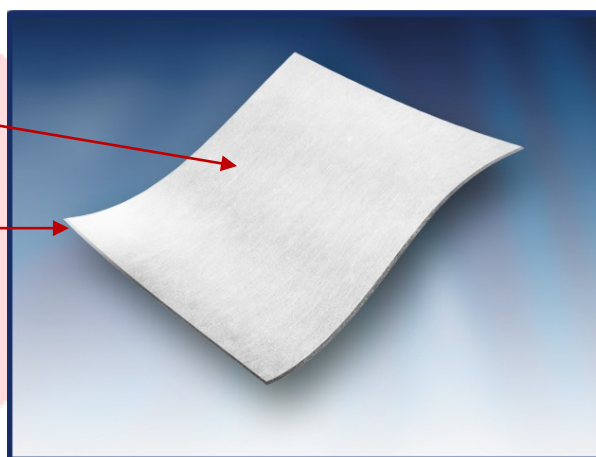

Descrição

O Pharmapad Carbon é um curativo, tecido não tecido, formado por 5 camadas, sendo uma camada de carvão ativado prensado entre 2 camadas de viscose rayon / poliamida. Os 2 lados exteriores do curativo são cobertos com filme polietileno não aderente. A camada de carvão ativado é responsável pela adsorção de odores fétidos, as 2 camadas absorventes são responsáveis pela absorção do exsudato, até 500%, e as camadas não aderentes de polietileno são responsáveis pela proteção da ferida, impedindo que a camada absorvente grude na ferida.

Apresentação comercial

O curativo Pharmapad Carbon é embalado em envelope de papel grau cirúrgico e papel laminado com filme PE. Cada envelope contém 1 (um) curativo.

Possui os seguintes modelos comerciais

Modelo (Código)	Dimensões	Apresentação comercial
Pad C 5050	5 cm x 5 cm	100/caixa
Pad C 5010	5 cm x 10 cm	100/caixa
Pad C 7550	7.5 cm x 5 cm	100/caixa
Pad C 7510	7.5 cm x 10 cm	100/caixa
Pad C 7515	7.5 cm x 15 cm	50/caixa
Pad C 7520	7.5 cm x 20 cm	50/caixa
Pad C 1010	10 cm x 10 cm	50/caixa
Pad C 1015	10 cm x 15 cm	50/caixa
Pad C 1020	10 cm x 20 cm	40/caixa
Pad C 1025	10 cm x 25 cm	40/caixa
Pad C 1030	10 cm x 30 cm	40/caixa

Indicações

O Pharmapad Carbon é um curativo que promove a absorção rápida e controlada de exsudatos leves a moderados. É ideal para feridas com mau cheiro, pois o carvão ativado presente na sua composição tem a função de adsorver os odores.

Contraindicações

Em caso de sensibilidade ao produto, descontinuar o uso.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

- a) **Precauções:** Não se aplica.
- b) **Restrições:** Não se aplica.
- c) **Advertências:** Uso Único – Descartar após o Uso – Produto Estéril.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

1. Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo interno.
2. Abrir a embalagem do produto.
3. Aplicar o curativo Pharmapad Carbon no local desejado. O curativo pode ser cortado conforme necessário.
4. Fixar o curativo sobre a pele com a ajuda de um curativo secundário. O adesivo secundário não acompanha o produto.
5. Para feridas com elevado exsudato usar como cobertura secundária absorvente como Vilowond, Espuma, etc.
6. Para feridas de moderado a leve exsudato filmes da linha ProMed Film ou Pharmapore PU.

Segurança e eficácia

O produto Pharmapad Carbon é esterilizado por gás óxido de etileno.

O teste de Bioburden é realizado rotineiramente pelo fabricante para monitoramento nas amostras dos produtos de acordo com a norma ISO 11737-1, antes e após o processo de esterilização.

Os resultados do teste de biocompatibilidade de acordo com os requisitos definidos na ISO 10993-10:2010 e ISO 10993-5:2010, demonstraram conformidade de acordo com as especificações, não demonstrando indicação de liberação de concentrações citotóxicas da substância, irritações ou sensibilidade da pele ou ferida.

Análise e avaliação de risco realizada de acordo com a norma EN ISO 14971:2012, não evidenciou nenhum risco específico relacionado ao uso do produto.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.

Armazenar em local seco e a temperatura ambiente.

Evite qualquer choque térmico.

Validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.
Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria,
Egypt, Zipcode: 37.23512

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME
Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril –
Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619
comercial@goldmedimport.com.br | CNPJ: 28.215.470/0001-91
Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120