

Ficha Técnica - Pharmapro


Registro ANVISA: MS 81606090004

Marca / Modelo fabricante: Pharmafix

Fabricante: Pharmaplast

Representação gráfica

Filme de suporte
quadriculado.

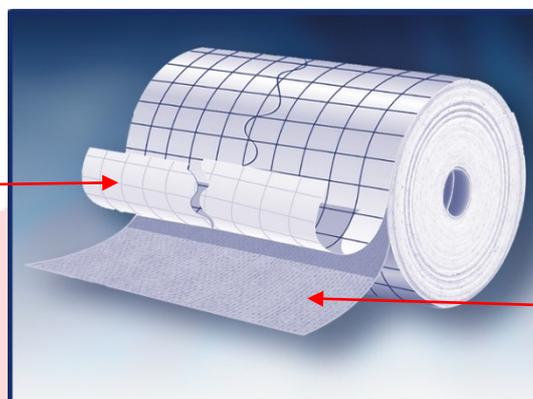

Filme adesivo
em spunlace.

Descrição

Filme adesivo não estéril em rolo, tecido não tecido de spunlaced, revestido com adesivo de cola quente, hipoalergênico e radiotransparente. Sua cobertura microperfurada combina segurança e conforto, altamente adaptável, proporciona uma fixação segura para cateteres e tubos de drenagem, permite a colocação de curativos em articulações sem limitar os movimentos, é flexível e recortável. Alta taxa de transmissão de vapores, 3500g/m²/24hrs, mantém o meio úmido ideal.

Apresentação Comercial

O curativo Pharmapro é embalado em papel cartonado constituído por papel-cartão, folha de alumínio e plástico (polietileno). Cada caixa contém 1 (um) curativo.

Produto não estéril.

O curativo Pharmapro possui os seguintes modelos comerciais:

Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões
Fix 2550	2.5 x 500 cm	Fix 7510	7.5 x 1000 cm
Fix 5050	5 x 500 cm	Fix 1010	10 x 1000 cm
Fix 7550	7.5 x 500 cm	Fix 1510	15 x 1000 cm
Fix 1050	10 x 500 cm	Fix 2010	20 x 1000 cm
Fix 2510	2.5 x 1000 cm	Fix 3010	30 x 1000 cm
Fix 5010	5 x 1000 cm	-	-

Indicação

Curativo para retenção de curativos pós-operatórios, gaze e compressas absorventes ou fixação de cateteres e tubos de drenagem.

Contraindicação


Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:

- a) **Precauções:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- b) **Restrições:** Não se aplica.
- c) **Advertências:** Produto não estéril em rolo, pode ser recortado no tamanho desejado e reutilizado.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instrução de uso

Limpar e secar a pele. Cortar no tamanho desejado. Remover a película quadriculada, esticando levemente para destacar o papel de liberação do centro para as extremidades e aplicar o filme sobre a pele exercendo delicada pressão sobre o mesmo, para garantir perfeita adesividade.

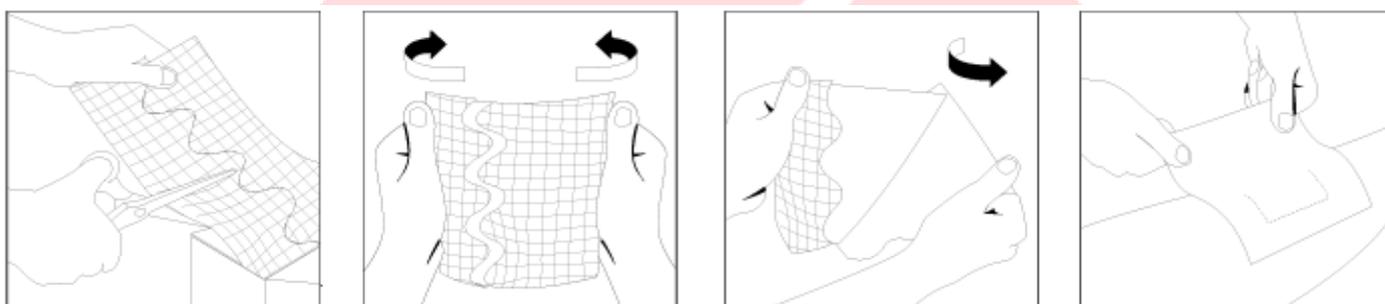

Segurança e eficácia

Os resultados do teste de biocompatibilidade demonstraram conformidade de acordo com a especificação não demonstrando indicação de liberação de concentrações citotóxicas da substância, conforme norma ISO 10993-5.

Os resultados do teste de sensibilidade foram negativos para sensibilização de contato tardia (dermatite alérgica de contato), conforme norma ISO 10993-10.

O teste de Bioburden é realizado rotineiramente pelo fabricante para monitoramento nas amostras dos produtos de acordo com a norma ISO 11737-1. Bioburden (carga microbiana) é definido como o número de microrganismos presentes em uma superfície que não tenha sido esterilizada.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.
Armazenar abaixo de 25 ° C.
Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.
Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria,
Egypt, Zipcode: 37.23512

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME
Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril –
Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619
contato@goldmedimport.com.br | CNPJ: 28.215.470/0001-91
Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120