


Ficha Técnica – Curativo Cure-Aid Protect

Registro ANVISA: MS 81606090006

Marca / Modelo fabricante: Cure-Aid Friccion Free

Fabricante: Pharmaplast

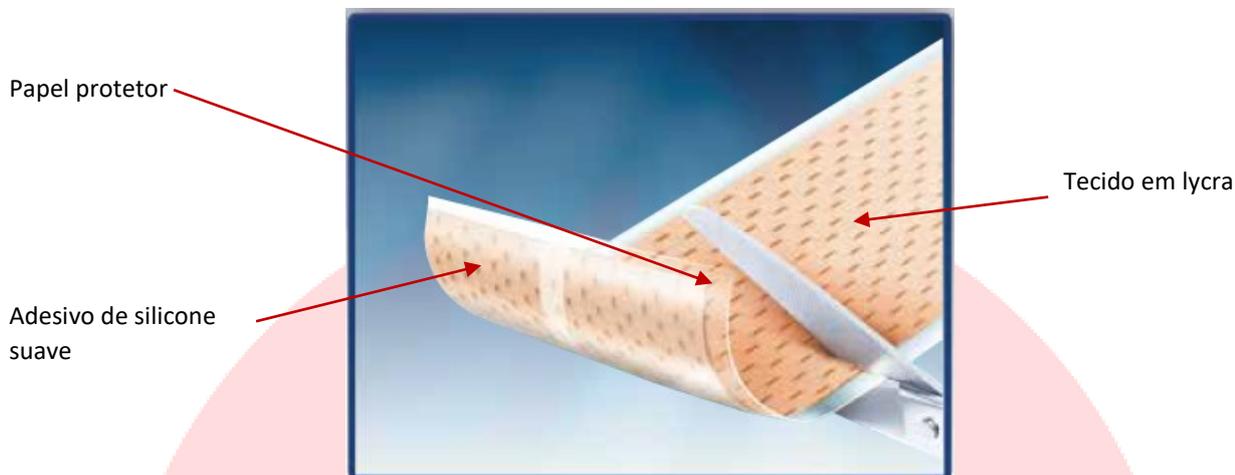

Representação gráfica

Descrição

Curativo não estéril, tecido em lycra com adesivo de silicone macio e autoaderente em um dos lados. Mínimo risco de tração sobre o tecido cutâneo. Menos fricção, a pele permanece em perfeitas condições, com risco mínimo de irritação ou alergia. Flexível, com ajuste perfeito, mesmo em zonas difíceis como em articulações. Troca indolor, sem deixar resíduos de adesivo na pele após a remoção.

Apresentação Comercial

Embalagem primária cartonada constituída por papel-cartão, folha de alumínio e plástico (polietileno).

Embalagem secundária em caixa de papelão.

Possui os seguintes modelos comerciais:

Códigos	Dimensões
FF525	5 x 25 cm
FF1015	10 x 15 cm
FF14511	14,5 x 11 cm
FF1458	14,5 x 8 cm
FF8545	8,5 x 4,5 cm
FF40	4 cm Ø

Indicação

Indicado para feridas com arranhões, irritação da pele devido à umidade, suor e fricção. Bolhas e feridas por fricção. Cicatrizes em regiões de pós operatório tardio.

Contraindicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte:

- a) **Precauções:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Não deve ser usado sobre lesões com perda de tecido.
- b) **Restrições:** Não se aplica.
- c) **Advertências:** Produto não estéril, reutilizável e lavável. Proibido reprocessamento.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instrução de uso

Limpar o local conforme protocolo da instituição. Retire o papel protetor do lado adesivado e aplicar o Cure-Aid Protect no local



desejado. Pressione toda a área do curativo do centro para as bordas para aumentar a aderência do curativo.

Segurança e eficácia

Os resultados do teste de biocompatibilidade de acordo com a requisitos definidos na ISO 10993, demonstraram conformidade de acordo com a especificação, não demonstrando indicação de liberação de concentrações citotóxicas da substância. Análise e avaliação de risco realizada de acordo com a norma EN ISO 14971:2012, não evidenciou nenhum risco específico relacionado ao uso do produto.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.
Armazenar abaixo de 25 ° C.
Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 05 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Fabricante: Pharmaplast S.A.E.
Amria Free Zone Nº 23512, Alexandria,
Egypt, Zipcode: 37.23512

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME
Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril –
Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619
comercial@goldmedimport.com.br | CNPJ: 28.215.470/0001-91
Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120