

Pharma Jelly Net

(MS 81606090049)

Descrição

Curativo primário, não oclusivo, sua camada de contato é uma camada lipocolóide não aderente gelatinosa. Composto por malha de poliéster impregnada com pó de carboximetilcelulose superabsorvente e petrolato.

Característica

Proporciona ambiente úmido ideal para o processo de cicatrização.

Estimula proliferação de fibroblastos.

Favorece a granulação e epitelização dos tecidos.


Remoção atraumática e indolor, sem deixar resíduos.

Troca a cada sete dias.

Pode ser recortado se necessário.

Permite transferência de exsudados, para um curativo absorvente secundário.

Estérel.

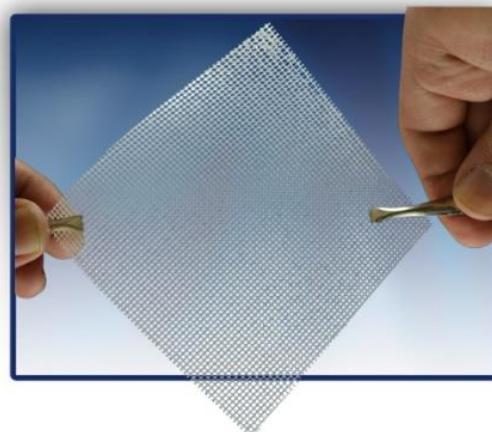

Indicação

Indicado como curativo primário, adequado para feridas agudas e crônicas de baixa a moderada exsudação. Pode ser usado para: queimaduras, feridas traumáticas, abrasões, feridas pós-operatórias, enxertos de pele e locais de doação, úlceras de perna, lesões por pressão, úlceras de pé diabético e epidermólise bolhosa.

Apresentação

Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões
JN 5050	5 cm x 5 cm	JN 100200	10 cm x 20 cm
JN 50100	5 cm x 10 cm	JN 100300	10 cm x 30 cm
JN 100100	10 cm x 10 cm	JN 150150	15 cm x 15 cm
JN 100100	10 cm x 10 cm	JN 150200	15 cm x 20 cm
JN 100150	10 cm x 15 cm	JN 150300	15 cm x 30 cm
JN 100200	10 cm x 20 cm	-	-

Instrução de uso

Limpar a ferida e, em seguida, enxaguar com solução salina. Secar cuidadosamente a pele ao redor da ferida. Escolha um curativo que seja ligeiramente maior do que a ferida. Remova o revestimento protetor do curativo. Aplique o curativo em contato íntimo com a base da ferida, assegurando que toda a superfície esteja coberta. Em feridas profundas ou de fístula, uma parte do curativo deve ser deixada visível para permitir a fácil remoção. Cobrir com um curativo secundário adequado para o nível de exsudato da ferida. Em seguida, cubra com um curativo de retenção adequado. O curativo de retenção não deve ser oclusivo. O curativo pode permanecer por até 7 dias. Para pacientes com epidermólise bolhosa, o curativo deve ser trocado de 1 a 3 dias.



Prazo de Validade

Válido por 3 anos.