

**Pharma - KT**  
(MS 81606090005)

### Descrição

Bandagem adesiva de tecido em poliéster e adesivo hipoalergênico. Ajuda a diminuir o inchaço e a dor nas áreas lesadas, melhora a circulação (fluxo sanguíneo) e auxilia na reparação de tecidos danificados. As propriedades elásticas garantem que os músculos e as articulações sejam apoiados de perto durante todas as atividades e desencorajam movimentos prejudiciais, permitindo ainda uma amplitude de movimento segura e saudável.

### Característica

Tecido extensível de alta qualidade.

Revestimento em adesivo poroso que permite transpiração, sem látex.

Tecido impermeável., que se adapta aos contornos do corpo.

Proporciona suporte para manter os músculos, ligamentos e tendões estáveis.

Eleva as camadas superiores da pele facilitando a circulação sanguínea e linfática.

### Indicação

Relaxamento muscular; dor e tensão em região lombar, lesões na virilha, lesões isquiotibiais, lesão do manguito rotador, dor no joelho, lesões após acidente (wiplash), cotovelo de tênis; luxação de patela, edema pré e pós-cirúrgico, torção no tornozelo, tendão de Aquiles, síndrome do estresse tibial, síndrome do túnel do carpo e também como método de prevenção de lesões atléticas e como método de apoio. Tem função de melhorar o alinhamento articular e a função da articulação, atuando em grupos de músculos opostos proporcionando mobilidade articular.

### Apresentação

Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões
KT2545	2.5 X 450 cm	KT2550	2,5 x 500 cm
KT545	5 X 450 cm	KT550	5 x 500 cm
KT7545	7.5 X 450 cm	KT7550	7,5 x 500 cm
KT1045	10 X 450 cm	KT1050	10 x 500 cm

### Instrução de uso

Certifique-se de que a pele está limpa e seca, sem loções/óleos, em uma articulação, certifique-se de que a mesma esteja em uma posição totalmente fletida. Nunca estique a primeira ou a última fita em nenhuma das pontas. A fita nas pontas deve ser aplicada diretamente na pele sem esticar; caso contrário, ele irá subir e não irá colar. Certifique-se de comprimir o adesivo esfregando firmemente a fita e certifique-se de que todas as bordas estejam voltadas para baixo. Para obter melhores resultados, aplique a fita 30 minutos antes da atividade física.



### Prazo de validade

Válido por 5 anos.