

Vendapress

(MS 81606090050)

Descrição

Vendapress é uma faixa elástica, adesiva, porosa, não irritante, com bordas que impedem marcas na pele. Mantém o grau de compressão escolhido no momento da aplicação sem auxílio de dispositivo para fixação. Acompanha contornos do corpo, permitindo a respiração da pele e o conforto do paciente. Composto de tecido não tecido elástico e adesivo com ou sem látex.

Característica

Mantém compressão uniforme .

Não desliza sobre a pele.

Adere sobre si mesma, sem aderir a pele.

Dispensa fixadores secundários.

Dispensa tesoura para recorte.

Permeável ao ar e à umidade, reduz risco de maceração.



Indicação




Indicada para a fixação de curativos primários, como bandagem de apoios para lesões que necessitam de uma maior compressão como distensões, torções, fraturas específicas, veias varicosas, úlceras, lesões esportivas e outros.

Apresentação

Vendapress	Vendapress Látex Free	Dimensões
VEND 2545	VENDLF 2545	2.5 X 450 cm
VEND 545	VENDLF 545	5 X 450 cm
VEND 7545	VENDLF 7545	7.5 X 450 cm
VEND 1045	VENDLF 1045	10 X 450 cm

Instrução de uso

Desenrole 30 cm da bandagem antes de começar a aplicar. Sem esticar aplique uma camada da bandagem até a primeira sobreposição. Pressione levemente a área de sobreposição para melhor fixação. Mantenha o local de aplicação bem apoiado. Continue aplicando a bandagem usando pressão suficiente para manter a compressão desejada. Corte o excesso de bandagem e pressione a extremidade para aderir sobre si mesma.

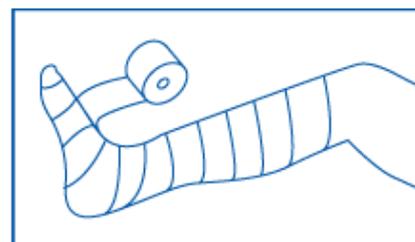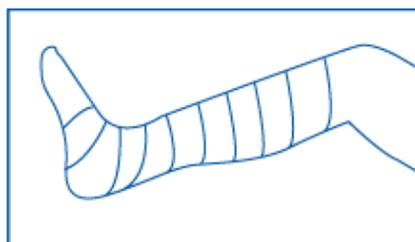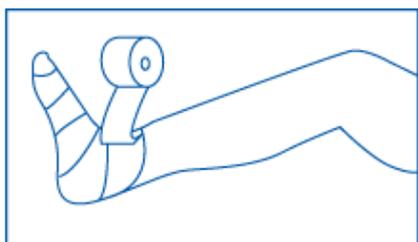

Prazo de validade

Valido por 5 anos.